

梱包内容

- ① キャリーバッグ
- ② 加温加湿器
- ③ 装置本体
- ④ 電源アダプター
- ⑤ エアチューブ
- ⑥ マスク一式
- ⑦ 取扱説明書+フィルター

※不足している場合は弊社までご連絡いただきますようお願いいたします。



ご使用開始までの流れ

動画で確認 →

※動画と下記写真は多少異なります。



1 電源接続



電源アダプターを装置本体の背面にある差込口に接続し、電源プラグをコンセントへ接続します。
(装置が起動し、画面が点きます)

2 エアチューブ接続



エアチューブの一方を装置本体に1cmほど差し込みます。
奥まで差し込みすぎると抜けなくなる場合があります。

3 マスク装着(鼻タイプ)



マスク下部両側のクリップを外し、マスクを鼻に合わせてベルトを上からかぶります。

4 フィッティング



クリップをマスク本体に接続し、ベルトのマジックテープを左右均等になるように調整します。

5 チューブとマスクを接続



エアチューブのもう一方をマスクへ接続します。
奥まで差し込みすぎると抜けなくなる場合があります。

6 自動スタート/ストップ



マスクを装着して呼吸をすると画面が切り替わり、自動で送気を開始します。マスクを外してしばらくすると自動で送気が停止します。

アンテナ表示に×が表示されている場合、電源を入れ直してアンテナが立つことをご確認ください。

鼻や喉が乾燥する場合、**加温加湿器**をご使用下さい。



加温加湿器へ蒸留水または精製水をMAX線まで入れ、装置本体に接続します。(煮沸し冷ました水道水可)



メニュー画面から湿度レベルを設定します。まずはレベル1から始めて下さい。

ボタン基本操作

- 手動スタート・ストップ
- 戻る
- ダイヤル 回す→移動 押す→決定
- 加温加湿器取り外し



毎日

マスク



ノンアルコールのウェットティッシュなどで肌に触れるシリコンパーツなどを拭きます。

毎週



マスクを分解してぬるま湯と薄めた中性洗剤で優しく洗浄します。水でしっかり洗い流した後、乾いた布などで水気を拭き取り日陰で乾燥させます。




加温加湿器



装置本体から取り外して流水で洗い、日陰で乾燥させます。

※水は毎日取り替えてください。

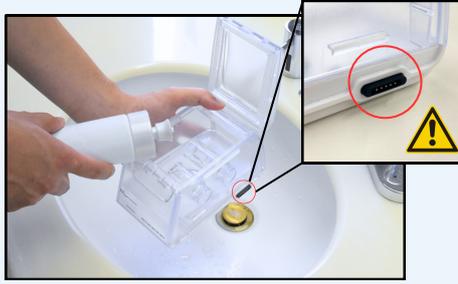

ぬるま湯が入った状態で薄めた中性洗剤を入れて洗浄します。その後水でしっかりすすぎ、乾いた布などで水気を拭き取り、日陰で乾燥させます。



! 電気接続部は濡らさないようご注意ください。

毎月

チューブ



ぬるま湯と薄めた中性洗剤で洗浄し、水でしっかりすすぎます。その後水気を切り、日陰に一日吊るして乾燥させます。



4ヶ月毎

フィルター



装置本体の背面のフィルターカバーを開き、新しいフィルターと取り替えます。

消耗品交換について

消耗品の劣化・破損により使用に支障が出る場合、それぞれ交換対応させていただきます。
マスクとフィルターは1年毎に新しいものと交換可能です。
自動送付とはなりませんのでご相談窓口までご連絡をお願いいたします。

レンタル機器となりますのでお取り扱いにはご注意ください

ご相談窓口

平日 9:00-18:00

045-594-9290



ゾーン株式会社

〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜3-19-5 新横浜第二センタービル6F

<https://www.sleepzone.co.jp/>

